

Fergus



# Suturas Especiales

**PRECISIÓN Y ALTA RESISTENCIA  
EN PROCEDIMIENTOS ORTOPÉDICOS**

# CordFit Meniscal Repair

Posee una **sutura tipo cuerda #2-0 con dos agujas rectas** para reparaciones meniscales mediante técnica inside-out, accediendo principalmente al cuerno anterior y al cuerpo del menisco.

- Disponible en color azul

## Flexibilidad y resistencia

Sus dos agujas rectas de 320 mm de largo y 0,73 mm de diámetro, fabricadas en acero inoxidable otorgan máxima flexibilidad. Además, cuenta con un grafado de alta resistencia, que soporta cargas de más de 20 N.<sup>1</sup>


## Pasaje sutil

Las agujas con punta diamante son ideales para perforar el menisco sin desgarrarlo. A su vez, su cubierta siliconada permite un pasaje suave a través del tejido.

## Instrumental asociado

Estas agujas se utilizan en conjunto con camisas de diferentes angulaciones, 25° y 65°, que permiten direccionar su pasaje a las zonas a reparar.

Las camisas meniscales cuentan con **punta roma**, que evitan daños en el menisco durante el procedimiento.

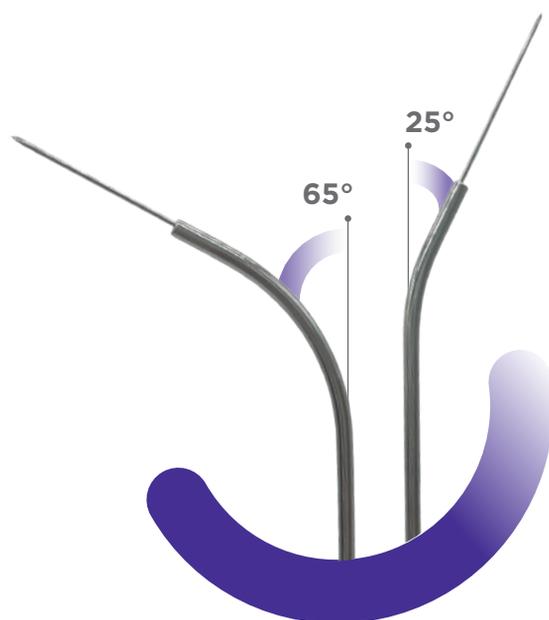

1. Definido por ensayos internos según US Pharmacopeia

# CordFit with Tapered Needle

Cuenta con una **sutura tipo cuerda #2**, y una **aguja medio círculo**, ideal para preparaciones de injerto y sutura de ligamentos y tendones en cirugías ortopédicas.

- Disponible en color azul

## ● Resistencia

El grafado de la sutura CordFit #2 with Tapered Needle es de alta resistencia y soporta cargas de más de 24 N.<sup>1</sup>

## ● Fluidez y precisión

La aguja de acero inoxidable es siliconada, de sección circular, y cuenta con una punta cónica que permite un paso suave y preciso por el tejido.



# CordFit Infinity

Cuenta con **una sutura en loop #2** y una **aguja recta de acero inoxidable de 70 mm de longitud**, para la preparación de distintos tipos de injerto.

- Disponible en color blanco-azul

## ● Resistencia

Su grafado soporta cargas de más de 24 N. Además, la resistencia del loop de sutura es mayor a 372 N.<sup>2</sup>

## ● Pasaje seguro

La aguja siliconada de sección circular permite un pasaje suave evitando el desgarro de tejidos.



# CordFit Stiff

**Sutura #2 con extremo endurecido y tubo protector de polipropileno de 355 mm de longitud.** Este producto es recomendado para recuperar suturas desde el interior articular hacia el exterior de un túnel óseo.

- Disponible en color azul



- **Extremo endurecido**  
Simplifica el paso de la sutura por el tubo protector.
- **Más precisión, menos tiempo**  
Su morfología facilita procedimientos tales como la reparación de raíz meniscal y la reconstrucción de ligamento cruzado anterior y/o posterior con técnica all-inside.

Las **suturas tipo cuerda CordFit multifilamento de UHMWPE** de Fergus poseen una longitud total de 38”.

CUENTAN CON UNA **GRAN RESISTENCIA A LA TRACCIÓN**,  
GARANTIZANDO UN EXCELENTE DESEMPEÑO  
EN CIRUGÍAS ORTOPÉDICAS.

Todas las suturas son fabricadas con polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE) de gran resistencia para brindar seguridad en los procedimientos quirúrgicos.



## INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Código	Descripción
FG-SU061120	Sutura CordFit Meniscal Repair #2-0 de UHMWPE, azul, con dos agujas
FG-IN590025	Camisa para reparación meniscal con punta inclinada 25°
FG-IN590065	Camisa para reparación meniscal con punta inclinada 65°
FG-SU040102	Sutura CordFit Infinity #2 de UHMWPE, blanca-azul, en loop con aguja recta
FG-SU021102	Sutura CordFit Stiff #2 de UHMWPE, azul, con extremo endurecido
FG-SU031102	Sutura CordFit with Tapered Needle #2 de UHMWPE, azul, con aguja 1/2 C